



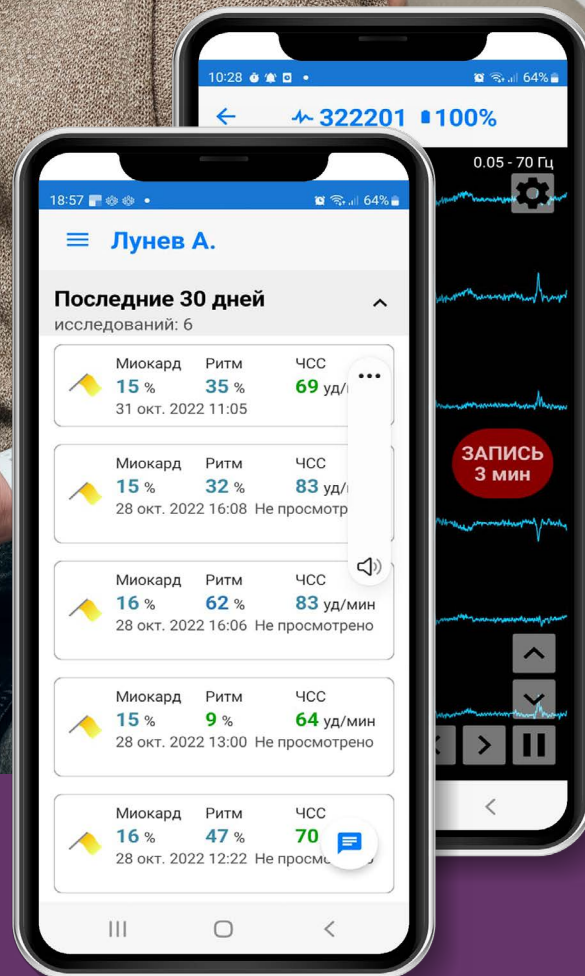


КардиРу
медицинский прибор
для самостоятельной регистрации
ЭКГ пациентом

www.kardi.ru

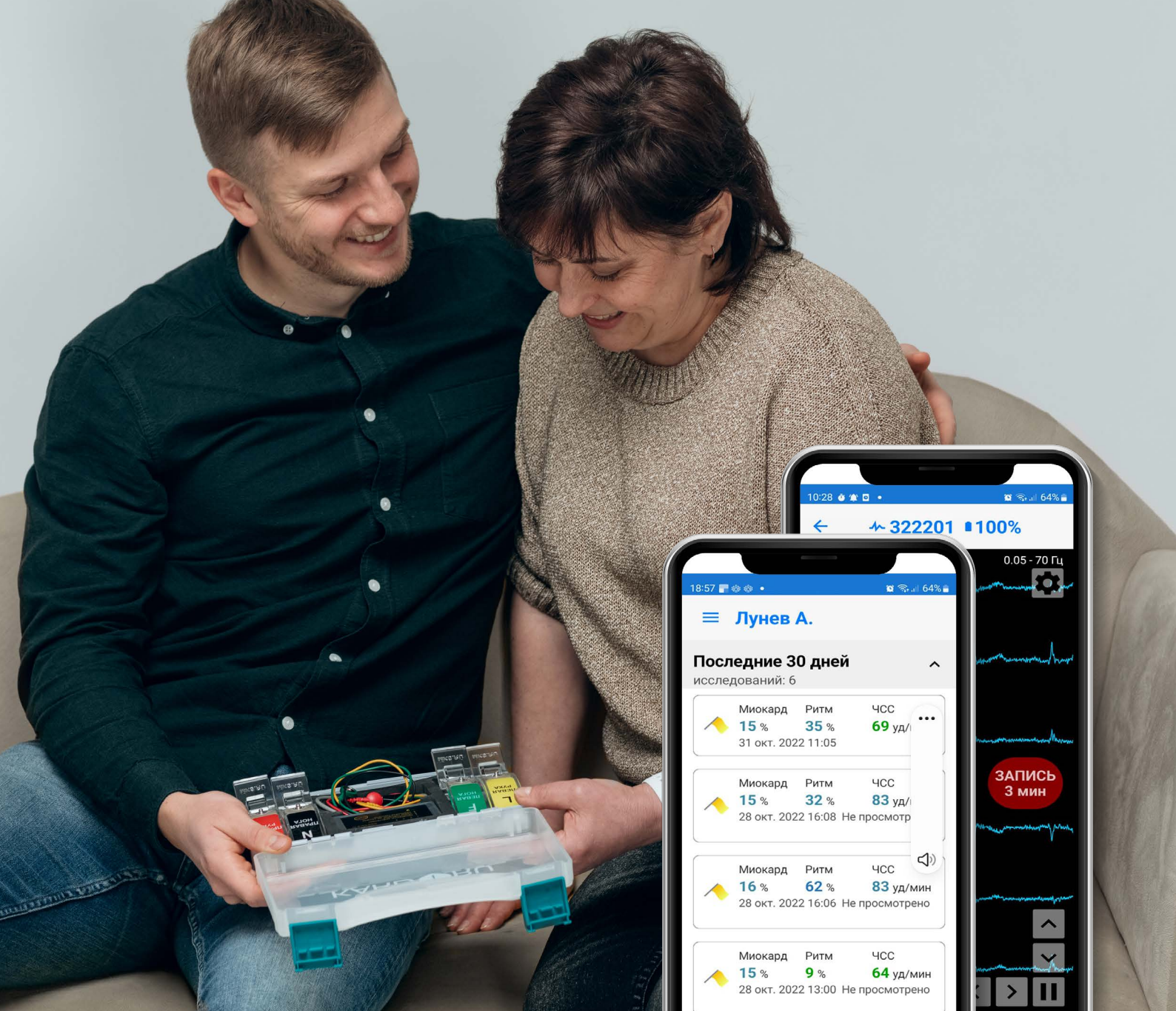


- Регистрация 6 или 12 отведений ЭКГ. Визуальное отображение ЭКГ в момент регистрации.
- Максимально простое и доступное использование прибора для любого пациента.
- Классическая автоматическая оценка ЭКГ исследования, а также оценка по светофорному принципу.
- Исследование регистрируется миниатюрным кардиоусилителем и автоматически передается в личный кабинет пациента и в личный кабинет врача по Интернет-каналу сотового оператора или Bluetooth подключение к любому устройству.
- Доступ к исследованиям из мобильного приложения или через Интернет-браузер с любого устройства

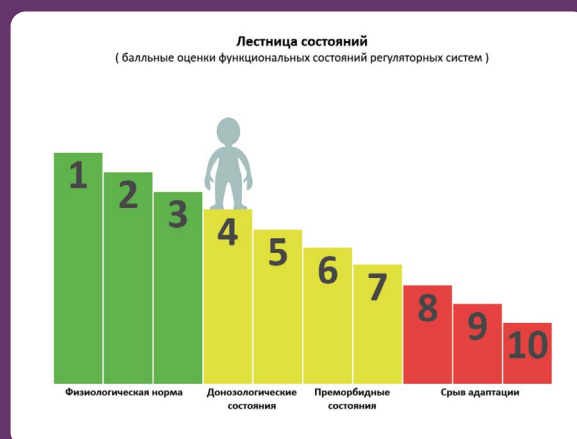

Применение для врача

КардиРу – это готовое многократно апробированное решение для организации телемедицинских услуг и дистанционного мониторинга пациентов в области регистрации и передачи ЭКГ для персональной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы.

- Врач выдает пациенту прибор КардиРу для самостоятельной регистрации ЭКГ.
- Пациент самостоятельно регистрирует исследования по назначенному врачом расписанию или в момент боли, приступа.
- Исследования становятся моментально доступным врачу сразу после регистрации вместе с автоматическим описанием и оценкой исследования.
- Проблемные исследования автоматически выделяются в потоке исследований.
- Возможность установки референтных исследований позволяет сравнить текущее исследование с референтным.

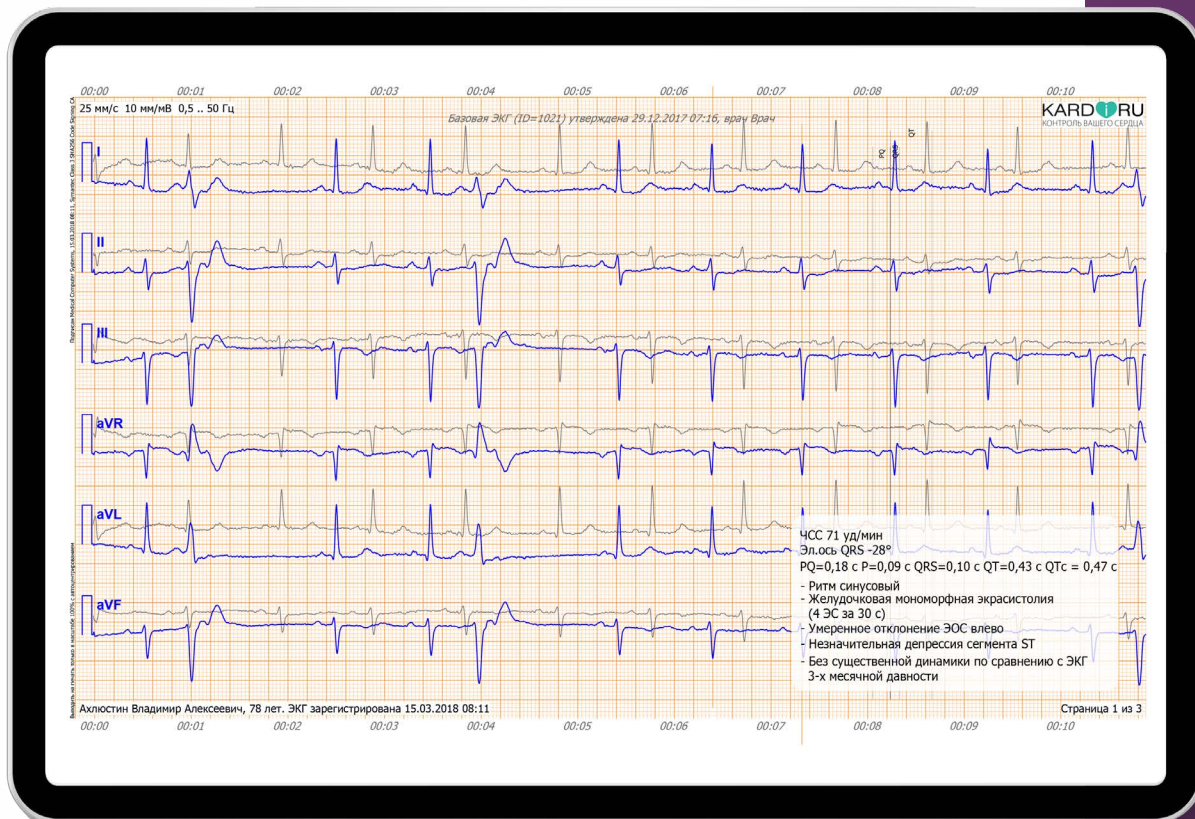

Применение для пациента

Пациент самостоятельно регистрирует исследование.

После каждого исследования пациент получает автоматическое заключение с формированием двух отчетов:

1. ЭКГ с описанием (фото отчета, ниже ссылка)
2. Дополнительная световорная оценка исследования (фото отчета)

При необходимости вы можете отправить исследование своему лечащему врачу или квалифицированному медицинскому консультанту КардиРу.



Области применения КардиРу



Контроль пациентов после выписки из стационара или в стационаре



Контроль послеоперационного восстановления пациентов



Наблюдение за нарушениями ритма



Оценка эффективности назначенной медикаментозной терапии



Контроль восстановления пациентов после инфаркта



Контроль состояния сердца спортсменов-профессионалов и любителей



Контроль интервала QT и скорректированного QT во время медикаментозной терапии COVID-19 и в период восстановления пациента после терапии



Контроль и предотвращение миокардита у пациентов при восстановлении после гриппа, ОРВИ и COVID-19



Регистрация ЭКГ-исследований прикрепленного населения в ФАП и дистанционный мониторинг исследований в ЦРБ



KARD  RU

ООО "Медицинские Компьютерные Системы"

Medical Computer Systems Ltd.

124460 Russia, Moscow, Zelenograd, passage 4922, building 4-2

+7 495 913 31 94

mks@mks.ru

mks.ru

Контактные данные поддержки проекта

+7 499 346 77 22

support@kardi.ru

kardi.ru