


Всегда проверяйте: 1. **N** электрод  
2. Соединение штекер (кнопка) — электрод!

## Помехи

| Помехи в отведениях | Электрод              |
|---------------------|-----------------------|
| I                   | <b>R</b> или <b>L</b> |
| II                  | <b>R</b> или <b>F</b> |
| V1...V6             | <b>C1...C6</b>        |

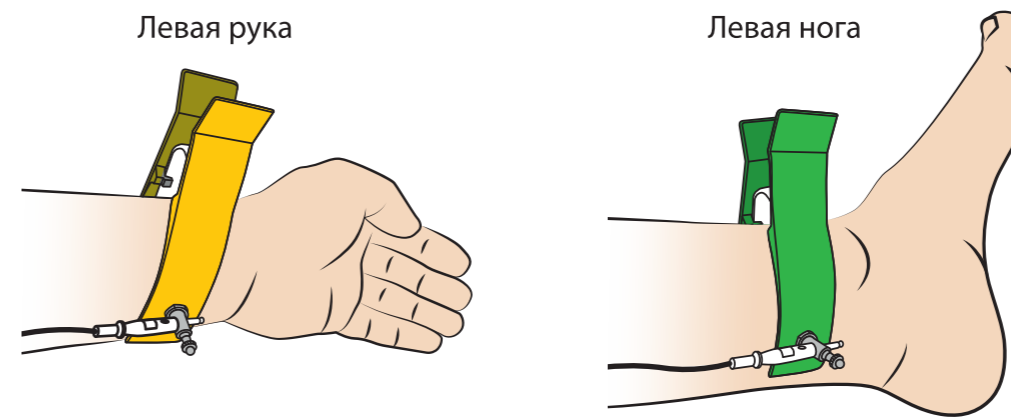

## Что делать?



- Переустановить электрод



- Обеспечить пациенту удобное положение и попросить расслабиться
- При треморе конечностей - перенести **R L F N** на туловище (по Мейсону-Ликару, по Хану или схеме Лунд)
- Включить фильтр нижних частот с частотой среза 30...40 Гц



- Обеспечить неподвижность проводов и электродов
- Включить фильтр верхних частот 0,3...0,5 Гц



- Отвести пациента от розетки и удлинителя
- Провода (кабель) ЭКГ положить на пациента
- Перейти на питание от аккумулятора
- Включить режекторный фильтр 50 Гц

